

GEBRAUCHSANLEITUNG

KINDER-REHASTUHL „BEN“
mit Untergestell



GEBRAUCHSANLEITUNG

KINDER-REHASTUHL „BEN“ mit Untergestell

INHALTSVERZEICHNIS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 3
Warn- und Sicherheitshinweise	Seite 3-4
Einrichten vor der ersten Benutzung	Seite 5
Benutzung mit Stuhlerhöhung	Seite 6
Einstellungen während der Benutzung	Seite 7
Regelmäßige Kontrolle	Seite 7
Maße Stuhl und Untergestell	Seite 8
Reinigung und Pflege	Seite 9
Material	Seite 9
Zubehör	Seite 9
Hersteller und Gütesiegel	Seite 10

Wichtig:

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um Gefahren bei der Benutzung zu vermeiden und um die Sicherheit des Kindes zu bewahren, befolgen Sie bitte genau diese Anleitung.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich und für den sachgemäßen Gebrauch als Möbelstück und Sitzgelegenheit in einem Raum bestimmt. Keinesfalls für die Verwendung an einem Fahrrad, Anhänger, in einem Auto oder ähnlichen Varianten vorgesehen.
- Die altersgemäße Größenempfehlung und die maximale Belastbarkeit des Sitzes entnehmen Sie bitte auf Seite 8 der jeweiligen Maßtabelle.
- Das Untergestell für den Kinderstuhl ist an die Form und Größe des Stuhls angepasst. Eine Verwendung für einen anderen Sitz oder Stuhl ist in keinem Fall vorgesehen und entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Die Gebrauchsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Reha-Kinderstuhls. Bewahren Sie die Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Im Falle eines Verlustes laden Sie sich bitte eine Kopie dieser Gebrauchsanleitung von unserer Homepage: www.kreativinholz.de
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät und ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet; es kann kippen oder umfallen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Benutzung des Stuhls unter Aufsicht erfolgt.
- Stellen Sie das Produkt auf einen festen, ebenerdigen und trockenen Untergrund.
- Ein Umfallen oder Herunterfallen des Stuhls sollte unbedingt vermieden werden, da die Gesamtkonstruktion und die damit verbundene Stabilität des Stuhls beeinträchtigt werden können.
- Unterbinden Sie bei verschraubten Pelotten und festgestelltem Abduktionskeil, dass ein nicht altersentsprechendes Kind oder Person sich gewaltsam in den Stuhl setzt. Alle Teile können beschädigt werden (ausreißen und abbrechen) und die Sicherheit und Stabilität des Produktes ist nicht mehr gewährleistet. Ebenso kann sich die Person selbst dabei verletzen. Für Fälle dieser Art aufgrund unsachgemäßer Behandlung des Produktes wird keine Haftung übernommen.
- Bitte nehmen Sie alle Grundeinstellungen vor, BEVOR das Kind im Stuhl Platz genommen hat. Jegliche Einstellungen müssen sorgfältig, für das Kind bequem und dennoch auf Sicherheit bedacht, vorgenommen werden. Das Kind darf durch die Pelotten oder den Abduktionskeil keinesfalls eingeengt werden.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte verwenden Sie nur die, von uns für dieses Produkt vorgesehenen, Gurtsysteme (Zubehör). Und bedenken Sie, dass OHNE Gurt das Kind nach vorne Kippen und Fallen kann. Es ist daher zu jeder Zeit eine Sicherung des Kindes notwendig.
- Stellen Sie sicher, dass während der Benutzung das Kind nie unbeaufsichtigt bleibt und jederzeit ein verantwortungsbewusster Erwachsener anwesend ist.
- Befestigen Sie keine Bauteile von anderen Firmen an diesem Kinderstuhl und adaptieren Sie ausschließlich die hierfür entwickelte Stuhlerhöhung. Bitte beachten Sie dabei, dass der Kinderstuhl zusammen mit der Stuhlerhöhung zu einem Hochstuhl für das Kind ausgebaut wird und das Kind zu jeder Zeit gesichert werden muss.
- Schutzvorrichtungen und Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Reha-Kinderstuhl und die Stuhlerhöhung sind CE geprüft und gekennzeichnet.
- Halten Sie dieses Produkt von offenem Feuer, Zigaretten und Wärmequellen wie Kaminfeuer, Heizkörpern und Heizgeräten fern. Bewahren Sie den Kinderstuhl bei Zimmertemperatur und in trockenen Räumen auf.
- Bitte stellen Sie vor der Benutzung des Reha-Hochstuhls dessen einwandfreien Zustand sicher. Sollten Sie Mängel an den Produkten während der Benutzung feststellen, nehmen Sie bitte das Kind sofort aus dem Stuhl und benutzen Sie diesen nicht mehr, bevor die Mängel fachgerecht beseitigt wurden.

Ein Abweichen von den Sicherheitshinweisen führt nicht nur dazu, dass die Garantie verfällt, sondern auch zu einer Gefährdung der Sicherheit! Der Hersteller *kreativ in holz* wird keine Haftung für Verletzungen und Schäden aufgrund derartigen Missbrauchs übernehmen. Reparaturen sollten von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.


EINRICHTEN vor der ERSTEN BENUTZUNG



1. Lockern Sie auf der Rückseite der Rückenplatte die beiden Schrauben (gegen den Uhrzeigersinn) und schieben Sie die **Pelotten** in die weiteste Einstellung, um anschließend die passende Einstellung für Ihr Kind vorzunehmen.



2. Bringen Sie den Abduktionskeil in die vorderste Stellung, indem Sie die Schraube unter dem Sitz lockern und den Keil nach vorne ziehen.

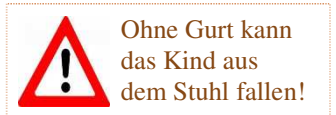

3. Setzen Sie das Kind in den Stuhl und sichern Sie es durch den 4-Punkt-Brustgurt (siehe Abb.) oder durch eine 2. Person. Nun die Pelotten und den Keil in die korrekte Stellung bringen und fixieren, indem Sie die Schrauben handfest anziehen (im Uhrzeigersinn).



4. Die Höhe des Trittbretts sollte i. d. R. so eingestellt sein, dass die Oberschenkel des Kindes im 90° Winkel zu den Unterschenkeln auf dem Trittbrett stehen. Die Anpassung erfolgt durch komplettes Abmontieren der Sternschrauben; das Einstellen der Trittbrethöhe durch Umstecken und erneutes Fixieren der Sternschrauben.

Achten Sie beim Stecksystem der Pelotten und des Trittbretts unbedingt darauf, dass diese im 90° Winkel fixiert werden. Ansonsten entstehen Zwischenräume und die Holzverbindungen können brechen.

Wichtig: Bitte befragen Sie zur korrekten Einstellung des Kinder-Rehastuhls therapeutisches Fachpersonal, sofern sie nicht selbst vom Fach sind.

BENUTZUNG mit STUHLERHÖHUNG



1. Lösen Sie auf der Rückseite der Stuhlerhöhung die Schraube und nehmen Sie die Abdeckplatte ab.



2. Führen Sie die Kufen des Stuhls in die Führung des Untergestells ein, bis die vorderste Kante abschließt.



3. Die Abdeckung wieder anbringen, die Schraube einsetzen und festziehen.

4. Schieben Sie den Stuhl aus Sicherheitsgründen grundsätzlich bis zur Tischkante, bis die Pelotten mit der Tischplatte abschließen.

Achten Sie dabei darauf, dass die Knie des Kindes nicht an die Tisch-Unterkante stoßen.



Ohne Gurt kann das Kind aus dem Stuhl fallen!

Achten Sie beim Zusammenstecken der beiden Teile auf die korrekte Verbindung und fest sitzende Schrauben und kontrollieren Sie vor jeder Benutzung die Einstellungen erneut.

Wichtig:

- ▶ Das Kind darf niemals unbeaufsichtigt bleiben.
- ▶ Der Hochstuhl darf auf keinen Fall mit Kind gezogen werden.
- ▶ Bitte vermeiden Sie den Stuhl mit Untergestell über unebene und holprige Flächen, Kopfsteinpflaster, usw. zu ziehen.

EINSTELLUNGEN während DER BENUTZUNG

- Sowohl die Pelottenbreite, als auch die -höhe können während der Benutzung eingestellt werden. Bitte verändern Sie jedoch nur einzeln die Einstellungen und sichern Sie während dieses Vorgangs das Kind in jedem Fall mit einem Gurt oder durch eine zweiten Aufsichtsperson, welche das Kind hält.
- Bitte führen Sie eine abschließende Sicherheitsprüfung durch, ob beide Pelotten, das Trittbrett, der Abduktionskeil und ggf. der Brustgurt korrekt eingestellt und alle Schrauben **fest** angezogen wurden.
- Während des ganzen Zeitraums der Benutzung bitte das Kind im Stuhl niemals unbeaufsichtigt lassen.

Wichtig: Sollten Sie feststellen, dass das Kind Angst hat, weint, zu sehr wippt oder der Kopf zu instabil ist, sodass die Gefahr besteht, das Kind könnte Schaden nehmen oder herausfallen, nehmen Sie das Kind bitte umgehend aus dem Stuhl.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE

- Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Stuhls ggf. inkl. Brustgurt, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, korrekt verschraubt und befestigt sind und alle Materialien sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
- Die Schrauben des Trittbretts müssen immer fest angezogen sein, da sonst die Steckverbindungen Schaden nehmen.

MASSE STUHL

	<u>Gr. 1</u>	<u>Gr. 2</u>
Alter des Kindes	1 - 4 Jahre	4 - 7 Jahre
Unterschenkelhöhe (Trittbrettstufen)	16,7 - 18,7 - 20,7 cm	19,5 - 22 - 24 - 26 cm
Sitzbreite	37,2 cm	40,2 cm
Sitztiefe mit Keil	13 - 18 cm	16 - 22 cm
Sitzhöhe o. Untergestell	28 cm	34 cm
Höhe Rückenlehne	30,5 cm	34,5 cm
Stuhlhöhe gesamt	58,5 cm	66 cm
Pelottenabstand	18 - 25 cm	18 - 28 cm
Pelotten-Achselhöhe	16 - 24 cm	19 - 29 cm
Pelottenschlitze	9 Stück	10 Stück
Pelotten (L/H/B)	19,5 x 14 x 2,5 cm	19,5 x 14 x 2,5 cm
Trittbrett (L/B/H)	23 x 40,5 x 2,5 cm	23 x 43 x 2,5 cm
Keil (L/B/H)	10 x 6 x 6,5 cm	10 x 6 x 6,5 cm
Gewicht ca.	8 kg	10 kg
max. Belastung	30 kg	40 kg
Tischunterkante mind.	38,5 cm	46 cm
Tischunterkante mit Stuhlerhöhung mind.	63 cm	65 cm

Jeder Stuhl ist ein Einzelstück, von uns designt und handgefertigt. Daher können Farb-, Material- und geringfügige Maßabweichungen möglich sein.

MASSE UNTERGESTELL

	<u>Gr. 1</u>	<u>Gr. 2</u>
Alter des Kindes	1 - 4 Jahre	4 - 7 Jahre
Höhe	33,5 cm	25 cm
Breite/Länge	40,5 x 35,5 cm	43,5 x 43 cm
Gewicht	4,8 kg	5,6 kg
Ø Rollen	4,5 cm	4,5 cm

Jede Stuhlerhöhung ist ein Einzelstück, von uns designt und handgefertigt. Daher können Farb-, Material- und geringfügige Maßabweichungen möglich sein.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Oberfläche ist Spritzwasser geschützt. Dennoch wischen Sie bitte jegliche Feuchtigkeit oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem trockenen Baumwolltuch ab, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Produkt sich verformt und die Benutzung und somit auch die Sicherheit eingeschränkt wird. Bei Verwendung von Antirutschmatten, diese regelmäßig und unbedingt nach dem Abwischen abnehmen, damit sie trocknen können. Bleibt die feuchte Matte auf dem Stuhl, quillt das Holz auf und die Herstellergarantie erlischt.
- Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen und dann gut nachtrocknen. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.

MATERIAL

Stuhlrahmen und Pelotten:	Massivholz Eiche
Stuhlteile:	Multiplexplatte Birke
Untergestell:	Multiplexplatte Birke
Abduktionskeil:	Kork
Oberfläche:	klar lackiert - gegen Spritzwasser geschützt

ZUBEHÖR

Trittbrett mit Rand vorne
 4-Punkt-Brustgurt, Beckengurt oder Sitzhose, versch. Größen
 Kopfstütze, auf der Rückenplatte vormontiert
 Rollen, vormontiert
 Haltegriff rückseitig
 Klemmhebel farbig
 Nackenpolster Styropor
 Untergestell Gr. 1-2

Für Fragen zu Sonderanfertigungen oder weiterem Zubehör sprechen Sie uns an: **kreativ in holz** – a bisserl anders
 Tel.: 0 81 23/99 18 785
 Mail: service@kreativholz.de

HERZLICHEN DANK!

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Produkt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

www.kreativholz.de

Unsere Sitzmöbel werden in
Deutschland/Bayern hergestellt

<p>kreativ in holz Schloßhügelweg 9, 85467, Neuching/Bayern Telefon 0 81 23/99 18 785 Mail: service@kreativholz.de www.kreativholz.de, www.kindersitzhilfe.de</p>	
--	---

