

GEBRAUCHSANLEITUNG

REITERSITZ „LEO“



GEBRAUCHSANLEITUNG

REITERSITZ „LEO“

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite 3
Warn- und Sicherheitshinweise	Seite 4
Einrichten vor der ersten Benutzung	Seite 5
Einstellungen während der Benutzung	Seite 6
Benutzung mit Rollen	Seite 7
Maße	Seite 8
Regelmäßige Kontrolle	Seite 9
Reinigung und Pflege	Seite 9
Material	Seite 9
Hersteller und Gütesiegel	Seite 10

Wichtig:

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um Gefahren bei der Benutzung zu vermeiden und um die Sicherheit des Kindes zu bewahren, befolgen Sie bitte genau diese Anleitung.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich und für den sachgemäßen Gebrauch als Möbelstück und Sitzgelegenheit in einem Raum bestimmt. Keinesfalls für die Verwendung an einem Fahrrad, Anhänger, in einem Auto oder ähnlichen Varianten vorgesehen.
- Die altersgemäße Größenempfehlung und die maximale Belastbarkeit des Sitzes entnehmen Sie bitte auf Seite 10 der jeweiligen Maßtabelle.
- Ein mögliches Untergestell für den Reitersitz ist an die Form und Größe des Sitzes angepasst. Eine Verwendung für einen anderen Sitz oder Stuhl ist in keinem Fall vorgesehen und entspricht nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE



- Die Gebrauchsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Reitersitzes. Bewahren Sie die Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Im Falle eines Verlustes laden Sie bitte eine Kopie dieser von unserer Homepage: **www.kreativinholz.de/Service**
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät und ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet; es kann kippen oder umfallen. Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die Benutzung des Sitzes unter Aufsicht erfolgt.
- Nutzen Sie das Produkt bitte auf einem festen, ebenerdigen und trockenen Untergrund. Die Rollen sind nur für glatte, saubere Böden geeignet.
- Ein Umfallen oder Herunterfallen des Sitzes sollte unbedingt vermieden werden, da die Gesamtkonstruktion und die damit verbundene Stabilität des Sitzes beeinträchtigt werden kann.
- Unterbinden Sie bei verschraubten Pelotten und festgestelltem Abduktionskeil, dass ein nicht altersentsprechendes Kind oder Person sich gewaltsam in den Sitz setzt. Alle Teile können beschädigt werden (ausreißen und abbrechen) und die Sicherheit und Stabilität des Produktes ist nicht mehr gewährleistet. Ebenso kann sich die Person selbst dabei verletzen. Für Fälle dieser Art aufgrund unsachgemäßer Behandlung des Produktes wird keine Haftung übernommen.
- Bitte nehmen Sie alle Grundeinstellungen vor, BEVOR das Kind Platz genommen hat. Jegliche Einstellungen müssen sorgfältig, für das Kind bequem und dennoch auf Sicherheit bedacht, vorgenommen werden. Das Kind darf durch die Pelotten oder den Abduktionskeil keinesfalls eingeeengt werden.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte verwenden Sie nur die, von uns für dieses Produkt vorgesehenen, Gurtsysteme (Zubehör). Und bedenken Sie, dass OHNE Gurt das Kind nach vorne Kippen und Fallen kann. Es ist daher zu jeder Zeit eine Sicherung des Kindes notwendig.
- Bedenken Sie, dass die Bockhöhe mit den Schrauben vorn und hinten fixiert ist und nur dadurch stabil ist. Achten Sie auf eine waagrechte Ausrichtung anhand der Beschriftung (Beispiel: Verschraubung vorne im Loch #1 und hinten im Loch #1 fixieren) und achten Sie auf Ihre Finger, wenn der Bock nach unten gesenkt wird oder ungesichert nach unten rutscht.
- Stellen Sie sicher, dass während der Benutzung das Kind nie unbeaufsichtigt bleibt und jederzeit ein verantwortungsbewusster Erwachsener anwesend ist.
- Bei der Benutzung mit Untergestell sind alle 4 Radbremsen festzustellen, damit ein unbeabsichtigtes Rollen unterbunden wird.
- Befestigen Sie keine Bauteile von anderen Firmen an diesem Reitersitz. Und adaptieren Sie ausschließlich das hierfür vorgesehene Untergestell. Bitte beachten Sie dabei, dass der Reitersitz in Verbindung mit dem Untergestell zu in einen Hochstuhl umgewandelt wird und das Kind daher zu jeder Zeit gesichert werden muss.
- Schutzvorrichtungen und Etiketten dürfen nicht entfernt werden.
- Der Reha-Reitersitz mit Untergestell ist CE geprüft und gekennzeichnet.
- Halten Sie dieses Produkt von offenem Feuer, Zigaretten und Wärmequellen wie Kaminfeuer, Heizkörpern und Heizgeräten fern. Bewahren Sie den Reitersitz bei Zimmertemperatur und in trockenen Räumen auf.
- Bitte stellen Sie vor der Benutzung des Reitersitzes dessen einwandfreien Zustand sicher. Sollten Sie Mängel an den Produkten während der Benutzung feststellen, nehmen Sie bitte das Kind sofort aus dem Sitz und benutzen Sie diesen erst wieder, nachdem die Mängel fachgerecht beseitigt wurden.

Ein Abweichen von den Sicherheitshinweisen führt nicht nur dazu, dass die Garantie verfällt, sondern auch zu einer Gefährdung der Sicherheit! Der Hersteller *kreativ in holz* wird keine Haftung für Verletzungen und Schäden aufgrund der Missachtung übernehmen. Reparaturen sollten von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

EINRICHTEN vor der ERSTEN BENUTZUNG

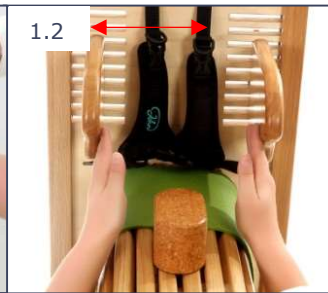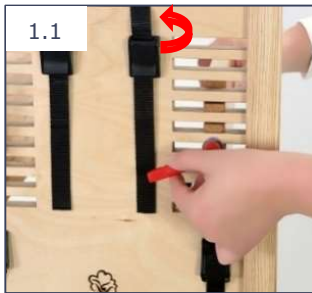

1. Lockern Sie auf der Rückseite der Rückenplatte die beiden Klemmhebel an den Pelotten (gegen den Uhrzeigersinn) und schieben Sie die **Pelotten** zunächst in eine weite Einstellung (Bild 1.2), um diese anschließend beim sitzenden Kind anzupassen.

Achten Sie beim Stecksystem der Pelotten unbedingt darauf, dass diese im 90° Winkel fixiert werden. Ansonsten entstehen Zwischenräume und die Holzverbindungen können brechen.



2. Bringen Sie den Abduktionskeil in die korrekte Stellung, indem Sie den Hebel lockern und den Keil nach vorne schieben. Anschließend die Schraube und Beilagscheibe handfest anziehen, um so den Keil erneut zu fixieren.

3. Setzen Sie das Kind auf den Reitersitz und sichern Sie es durch den 4-Punkt-Brustgurt oder durch eine 2. Person. Nun die Pelotten in die korrekte Stellung bringen und fixieren, indem Sie die Schrauben handfest anziehen (im Uhrzeigersinn).



Ohne Gurt kann das Kind vom Sitz fallen!

4. Die Bockhöhe entsprechend bemessen und einstellen. Dafür müssen die beiden Schrauben vorne und hinten herausgenommen werden und in der gewünschten Einstellung (vorne und hinten die gleiche Höhe!) erneut verschraubt werden.
5. Bei der Verwendung des Untergestells: Bitte verbinden Sie das Untergestell mit dem Reitersitz – **bevor** das Kind Platz nimmt.

Wichtig: Bitte befragen Sie zur korrekten Einstellung des Reitersitzes therapeutisches Fachpersonal, sofern sie nicht selbst vom Fach sind.

EINSTELLUNGEN während DER BENUTZUNG

- Sowohl die Pelottenbreite, als auch die -höhe können während der Benutzung eingestellt werden. Bitte verändern Sie jedoch nur einzeln die die Einstellungen und sichern Sie während dieses Vorgangs das Kind in jedem Fall mit einem Gurt oder durch eine zweiten Aufsichtsperson, welche das Kind hält.
- Bitte führen Sie eine abschließende Sicherheitsprüfung durch, ob beide Pelotten, der Abduktionskeil und bei Bedarf der Gurt korrekt eingestellt und alle Schrauben **fest** angezogen wurden.
- Während des ganzen Zeitraums der Benutzung bitte das Kind im Sitz niemals unbeaufsichtigt lassen.

Vorsorglicher Hinweis:

Bitte untersuchen Sie gerade in der ersten Zeit, ob bei Ihrem Kind Druckstellen, Rötungen oder andere Beschwerden auftreten oder das Kind über Beschwerden klagt.

Eine Umstellung von einem anderen Therapiesitz kann mit diesen Anzeichen einher gehen.

In diesem Fall: Einfach in der Übergangszeit den Rücken oder Po mehr polstern und die Nutzungszeit verkürzen.

Sollten Sie feststellen, dass das Kind Angst hat, weint, zu sehr wippt oder der Kopf zu instabil ist, sodass die Gefahr besteht, das Kind könnte Schaden nehmen oder herausfallen, nehmen Sie das Kind bitte umgehend aus dem Sitz.

MÖGLICHES ZUBEHÖR

Abduktionskeil
4-Punkt-Brustgurt, Beckengurt, Sitzhose, versch. Größen
Antirutschmatte 10 mm für Sitz
Nackenpolster (Styropor)
Klemmhebel farbig
4 Rollen mit Bremshebel

BENUTZUNG mit Rollen



1. Zum Hineinsetzen des Kindes drücken Sie die Bremshebel nach unten, bis Sie ein „klick“ hören. Danach können diese wieder gelöst werden, um den Stuhl mit dem Kind zu bewegen.



Ohne Gurt kann das Kind aus dem Stuhl fallen!

2. Schieben Sie den Stuhl aus Sicherheitsgründen unbedingt bis zur Tischkante, bis die Pelotten mit der Tischplatte abschließen. Achten Sie dabei darauf, dass die Knie des Kindes nicht an die Tisch-Unterkante stoßen.

3. Befreien Sie hin und wieder die Rollen von Schmutz und möglichen Haaren. Diese beeinträchtigen sonst die Gängigkeit der Rollen.



RICHTIG



ABMESSUNGEN

	<u>Gr. 2</u>	<u>Gr. 3</u>	<u>Gr. 4</u>
Alter des Kindes	4 - 7 Jahre	7 - 10 Jahre	ab 11 Jahre
Unterschenkelhöhe (Trittbrettstufen 2 cm)	25,0 - 37,0 cm	34,0 - 51,0 cm	39,0 - 55,0 cm
Bockbreite	23,0 cm	25,0 cm	30,0 cm
Sitztiefe ohne Keil	42,0 cm	47,0 cm	56,0 cm
Sitztiefe mit Keil	bis 27 cm	bis 32 cm	bis 41 cm
Sitzhöhe	25,0 - 37,0 cm	34,0 / 50,0 cm	39,0 - 55,0 cm
Höhe Rückenlehne	43,0 - 32,0 cm	53,0 - 38,0 cm	61,0 - 45,0 cm
Höhe Gesamt	69,0 cm	96,0 cm	100,0 cm
Pelottenabstand (B)	15,0 - 28,5 cm	18,0 - 30,0 cm	20,5 - 33,5 cm
Pelottenschlitze	14 Stück	20 Stück	21 Stück
Pelotten (L/H/B)	19,5 x 14,0 x 2,5 cm	19,5 x 14,0 x 2,5cm	19,5 x 14,0 x 2,5cm
Bodenplatte (L/H/B)	63,0 x 50,0 cm	68,0 x 57,0 x 2,5cm	81,0 x 63,0 x 2,5cm
Ø Rollen hinten	5,0 cm	5,0 cm	5,0 cm
Keil (L/B/H)	9,0 x 7,5 x 7,5 cm	10,0 x 9,0 x 10,0 cm	12,0 x 10,0 x 10,0 cm
Gewicht ca.	18,0 kg	24,0 kg	29,0 kg
max. Belastung ca.	60,0 kg	90,0 kg	100,0 kg

Jeder Stuhl ist ein Einzelstück, von uns designt und handgefertigt. Daher können Farb-, Material- und geringfügige Maßabweichungen möglich sein.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE

- Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz des Reitersitzes, dass alle Teile vollständig vorhanden sind, korrekt verschraubt und befestigt sind und alle Materialien sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
- Die Schrauben aller Teile müssen zu jeder Zeit fest angezogen sein, da sonst die Steckverbindungen Schaden nehmen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Oberfläche ist Spritzwasser geschützt. Dennoch wischen Sie bitte jegliche Feuchtigkeit oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem trockenen Baumwolltuch ab, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Produkt sich verformt und die Benutzung und somit auch die Sicherheit eingeschränkt wird.
Bei Verwendung von Antirutschmatten, diese regelmäßig und unbedingt nach dem Abwischen abnehmen, damit sie trocknen können. Bleibt die feuchte Matte auf dem Sitz, quillt das Holz auf und die Herstellergarantie erlischt.
- Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Baumwolltuch entfernen und dann gut nachtrocknen. Verwenden Sie keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.

MATERIAL

Rahmen Rückenplatte	Massivholz Eiche
Sitzleisten + Pelotten	Massivholz Eiche
Rückenplatte + Trittbretter	Multiplexplatte Birke
Untergestell	Multiplexplatte Birke
Abduktionskeil	Kork, klar lackiert
Oberfläche	klar lackiert - gegen Spritzwasser geschützt

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt und verändert im Verlauf der Jahre seine Farbe. Vermeiden Sie unbedingt starke und dauerhafte Sonneneinstrahlung, da dies zu einem fleckigen Oberflächenbild führen kann.

Für Fragen zu Sonderanfertigungen oder weiterem
Zubehör sprechen Sie uns an:

HERZLICHEN DANK!

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

kreativ in holz – NATÜRLICH SITZEN

Tel.: +49 (0) 81 23/99 18 785

Mail: service@kreativinholz.de

www.kreativinholz.de

